

Pașii pentru instalare Software Somnus și citirea datelor de pe cardul SD al aparatului APAP/CPAP DM28

Pasul 1.

Se descarcă **Software-ul Somnus** accesând următorul link:

[https://nbmedical.ro/Software CPAP APAP BIPAP Somnus%200.01.10.012-2.zip](https://nbmedical.ro/Software_CPAP_APAP_BIPAP_Somnus%200.01.10.012-2.zip)

Pasul 2.

La apăsarea link-ului, softwer-ul se va descărca automat sau v-a solicita acordul Administratorului pentru instalare.

Pasul 3.

Se inserează cardul SD în calculator sau se conectează la calculator cu ajutorul unui cititor de carduri (având grijă să nu se forțeze pentru a nu deteriora elementii de citire inclusiv carcasa și rizurile din plastic).

Pasul 4.

Se descarcă fișierele de pe cardul SD în calculator într-un folder nou creat.

Pasul 5.

Se deschide **Software-ul Somnus** și se apasă pe prima pictogramă



din stânga pentru a crea un user nou.

Pasul 6.

Se completează câmpurile solicitate (family name, given name, gender, date of birth , height, weight, blood tipe) după care se apasă butonul "Save".

Pasul 7.

Se importă datele salvate anterior la Pasul 5, apăsând butonul
"DATALOG".



de import, fișierul denumit

Pasul 8.


Din panoul din stânga unde se vor afișa perioadele de utilizare se selectează perioada dorită prin bifarea căsuței corespunzătoare.

Notă: Dacă nu apar căsuțele se apasă pe butonul de desfașurare a perioadei, conform imaginii de mai jos.



Pasul 9.

Exportul Rapoartelor/ Printarea rapoartelor

Se apasă pictograma imprimare  selectând raportul dorit: **Statistics/Curve Chart/Histogram.**

Prin selectarea comenzii "Save As" fișierele pot fi salvate în format PDF.

Pentru orice alte informații sau întrebări nu ezitați să ne contactați.